

Elite

-ISTUINMALLIT

Kävelykepeistä kätevästi istuimeksi hetkessä!

Kiitos, että valitsit Linden Elite -istuimen. Toivotamme monia tyytyväisiä käyttövuosia. Turvallisuuden varmistamiseksi lue kaikki ohjeet:

- **Elite Stroller** – Kävelykepin korkeus: 825 mm
Istuimen korkeus: 755 mm
- **Elite Walker** – Kävelykepin korkeus: 855 mm – 935 mm
& **Tracker** Istuimen korkeus: 775 mm – 850 mm
- **Elite Packaway** – Kävelykepin korkeus: 815 mm – 925 mm
Istuimen korkeus: 735 mm – 815 mm
- Käyttäjän enimmäispaino: 125 kg

Elite-istuin on tarkoitettu vain yhden henkilön istuimeksi.

Älä käytä sitä mihinkään muuhun.

VAROITUS: Yksiputkiset keppi-istuimet on tarkoitettu henkilöille, jotka pysyvät turvallisesti tasapainossa istuimella ja voivat muodostaa tukevan "kolmijalan" niin, että paino jakautuu istuimen ja jalkojen vaaraan. Jos sinulla on tasapainoon vaikuttava vamma tai sairaus, konsultoi lääkärä ennen käyttöä.

1. Säädettävissä malleissa korkeus säädetään painamalla kumpaakin jousinappia ja liu'uttamalla jalka haluttuun pituuteen. Varmista ennen käyttöä, että kumpikin nappi on lukittunut reikään.
2. Istuimen avaaminen: Ota kiinni mustasta lukitsinholkista ja vedä alaspäin.
3. Käännä istuin vaaka-asentoon. Varmista, että lukitsinholkki on kunnolla kiinni istuimessa.
4. Aseta istuin taaksesi noin 35 cm:n päähän. Kallista istuinta itseäsi kohti ja istu hitaasti niin, että jalkasi ovat noin 35 cm erillään toisistaan.



PACKAWAY-MALLI

Ota ensin molemmat jalat pois pussista. Irrota sitten istuin pitäen kiinni samalla sekä istuimesta että putkista. Vedä putkia irti toisistaan niin, että ne taittuvat yhteen.



SAATAVILLA
OLEVAT MALLIT

Stroller

(ei säädettävä,
kumijalka)

Walker

(säädettävä,
kumijalka)

Tracker

(säädettävä, kärki
ja levy vain
pehmeälle maalle)

Packaway

(säädettävä,
kumijalka & kärki
ja levy)

SAATAVILLA
OLEVAT VÄRIT:

Musta tai vihreä