

## Im Handumdrehen vom Spazierstock zum erholsamen Sitzstock!

Vielen Dank dafür, dass Sie einen neuen Linden Elite- Sitz gewählt haben und wir wünschen Ihnen einen hilfreichen Begleiter für viele Jahre. Zu Ihrer Sicherheit lesen Sie bitte alle Anweisungen:

- **Elite Stroller** – Gehhöhe: 825 mm  
Sitzhöhe: 755 mm
- **Elite Walker** – Gehhöhe: 855 mm bis 935 mm  
& **Tracker** Sitzhöhe: 775 mm bis 850 mm
- **Elite Packaway** – Gehhöhe: 815 mm bis 925 mm  
Sitzhöhe: 735 mm bis 815 mm
- **Max. Benutzergewicht:** 125 kg

Der Elite- Stock ist für den Gebrauch als Sitz für eine Person bestimmt. Benutzen Sie ihn nicht für andere Zwecke.

**ACHTUNG:** Einrohr-Sitzstöcke sind nur für Personen geeignet, die auf dem Sitz sicher die Balance halten können. Sie sollten in der Lage sein, mit den Füßen und der Sitzfläche durch die gleichmäßige Verteilung Ihres Gewichtes ein Dreieck bilden zu können. Falls Sie eine Behinderung oder eine Einschränkung haben, die Ihre Balance beeinflusst, sollten Sie vor der Benutzung ärztlichen Rat einholen.

1. Gegebenenfalls kann die Höhe verstellt werden, indem Sie beide Federknöpfe eindrücken und das Innenrohr auf die gewünschte Länge einstellen. Stellen Sie sicher, dass beide Federknöpfe wieder in das gewünschte Lochpaar springen, bevor Sie den Sitz benutzen.
2. Um den Sitz zu öffnen: Greifen Sie die schwarze Verriegelungsmanschette und ziehen Sie sie fest nach unten.
3. Klappen Sie den Sitz in horizontale Lage. Stellen Sie sicher, dass die Verriegelungsmanschette dann vollständig in den Sitz einrastet.
4. Platzieren Sie den Sitzstock ca. 35 cm hinter sich. Lehnen Sie den Sitz nach vorne und setzen Sie sich langsam hin, die Füße ca. 35 cm auseinander.



**MODELL PACKAWAY** Zuerst entnehmen Sie bitte die zwei Füße der Tasche. Danach entnehmen Sie den Sitz und achten dabei auch darauf, die Stangen festzuhalten. Verbinden Sie dann die Stangen so, dass sie ineinander passen.



VERFÜGBARE  
MODELLE:

**Stroller**  
(nicht verstellbar,  
mit Gummifuß)

**Walker**  
(verstellbar, mit  
Gummifuß)

**Tracker**  
(verstellbar, mit  
Spitze/Scheibe  
nur für weichen  
Untergrund)

**Packaway**  
(verstellbar, mit  
Gummifuß und  
Spitze/Scheibe)

VERFÜGBARE  
FARBEN:

Schwarz  
oder Grün