

# Out & About

-ISTUINMALLIT

## Kävelykepeistä kätevästi istuimeksi hetkessä!

Kiitos, että valitsit Linden Out & About -istuimen. Toivotamme monia tyytyväisiä käyttövuosia. Turvallisuuden varmistamiseksi lue kaikki ohjeet:

- Out & About – Kävelykepin korkeus: 925 mm  
Istuimen korkeus: 410 mm
- Out & About – Kävelykepin korkeus: 960 mm  
Sport Istuimen korkeus 440 mm
- Käyttäjän enimmäispaino: 125 kg.

Out & About -istuimessa on neljä kumijalkaa, ja se on suunniteltu käytettäväksi tasaisilla, pitävillä pinnoilla.

**HUOMIO:** Tarkista säännöllisesti, että kaikki kumijalat ovat hyvässä kunnossa. Turvallisuussyistä **ÄLÄ** käytä istuinta, jos jokin jaloista puuttuu.

1. Käyttö istuimena: Avaa täysin ja varmista, että kaikki jalat koskettavat maata.
2. Istu alas hitaasti. Parhaan tasapainon saavuttamiseksi on tärkeää, että istut reidet eteenpäin ja molemmat jalat tukevasti maassa.
3. Out & About -istuin on tarkoitettu vain yhden henkilön istuimeksi. Älä käytä sitä mihinkään muuhun.



## SPORT-ISTUINMALLIT

Sport-istuinmalleja, joissa on lisänä kärki ja levy -jalat, voidaan käyttää pehmeällä maalla irrottamalla kaikki kumijalat. Laita kumijalat takaisin kovalla pinnalla käytettäessä.



SAATAVILLA  
OLEVAT MALLIT

Kiillotettu  
alumiinirunko  
ja värillinen  
kangas

tai

Deluxe,  
jossa istuimen  
väriseksi  
maalattu runko

SAATAVILLA  
OLEVA VÄRIT:

Musta, vihreä tai  
viininpunainen

