

# Out & About

SORTIMENTET

## Från vandringspinne till en vilostol på ett ögonblick!

Tack för att du väljer en Linden Out & About-stol. Vi önskar dig många år av nöjd användning. Läs alla instruktioner för din fullständiga säkerhet:

- Out & About – Gånghöjd: 925 mm  
Sithöjd: 410 mm
- Out & About – Gånghöjd: 960 mm  
Sport Sithöjd: 440 mm
- Maximal användarvikt: 125 kg.

Din Out & About-stol är komplett med fyra gummidoppskor och har utformats för att användas på jämna ytor som inte är hala.

**OBS!** Kontrollera regelbundet att samtliga gummidoppskor är i gott skick. Använd **ALDRIG** en stol om en doppsko saknas för din säkerhets skull.

1. För att använda en stol: Öppna helt och säkerställ att alla benen är i kontakt med marken.
2. Sätt dig ned långsamt. För maximal stabilitet är det viktigt att du har benen framför dig, och båda fötterna fast på marken när du sitter ned.
3. Out & About-stolen är endast avsedd för användning för en person. Använd den inte för något annat.



## SPORTMODELLER

Sportmodellen med en ytterligare fästpunkt och fotplatta kan användas på ett mjukt underlag genom att ta bort alla gummidoppskor. Sätt tillbaka alla gummidoppskor för användning på ett hårt underlag.



TILLGÄNGLIGA  
MODELLER

Polerad  
aluminiumram  
och färgad  
kanvas

eller

"Deluxe"-  
målad ram för  
att matcha  
stolfärg

TILLGÄNGLIGA  
FÄRGER:

Svart, grön eller  
vinfärgad

