

Out & About

LÍNEA

¡De bastón a cómoda silla en un instante!

Gracias por elegir el modelo Out & About de Linden. Le deseamos muchos años de uso satisfactorio. Para su completa seguridad, lea todas las instrucciones:

- **Out & About – Altura andando: 925 mm**
Altura del asiento: 410 mm
- **Out & About – Altura andando: 960 mm**
Sport Altura del asiento: 440 mm
- **Peso máximo del usuario: 125 kg.**

Su modelo Out & About se complementa con 4 conteras de goma y ha sido diseñado para usarse en superficies planas y no deslizantes.

NOTA: Compruebe con regularidad que todas las conteras de goma estén en buenas condiciones. Por su seguridad, **NUNCA** use la silla si falta alguna contera de goma.



1. Para usar como silla: extiéndalo totalmente y asegúrese que todas las patas estén en contacto con el suelo.
2. Siéntese lentamente. Para una mayor estabilidad es importante que cuando esté sentando mantenga sus piernas en el frente con ambos pies apoyados firmemente en el suelo.
3. El modelo Out & About está pensado únicamente para uso individual. No usar para ninguna otra actividad.



MODELOS SPORT

Los modelos Sport con la puntera y roseta adicionales pueden usarse en suelos blandos quitándole las conteras de goma. Vuelva a poner las conteras de goma para usar la silla en suelos duros.



MODELOS
DISPONIBLES

Estructura
de aluminio
pulido y tela
en color
o

"Deluxe" con
estructura
pintada para
combinar
con el color
del asiento –

COLORES
DISPONIBLES:

Negro, verde
y granate

