

Out & About

GAMME DE SIÈGES

Passez d'une canne de marche à un siège en un instant!

Nous vous remercions d'avoir choisi la canne- siège Linden Out & About. Nous vous souhaitons de nombreuses années d'utilisation heureuse. Pour votre sécurité, veuillez lire les instructions suivantes :

- **Out & About – Hauteur de marche : 925 mm
Hauteur d'assise : 410 mm**
- **Out & About – Hauteur de marche : 960 mm
Sport Hauteur d'assise : 440 mm**
- **Poids maximum supporté : 125 kg**

Votre siège Out & About est livré avec quatre embouts en caoutchouc et il a été conçu pour une utilisation sur des surfaces planes et non-glissantes.

NB : vérifiez régulièrement que tous les embouts en caoutchouc soient en bon état. Pour votre sécurité, n'utilisez JAMAIS la canne siège si un embout manque.



1. Pour l'utiliser comme un siège : ouvrez-le complètement et assurez-vous que tous les pieds soient en contact avec le sol.
2. Asseyez-vous doucement. Pour un maximum de stabilité, il est important que vos jambes soient placées devant vous, et que vos deux pieds soient fermement au sol lorsque vous êtes assis.
3. Le siège Out & About est conçu pour n'être utilisé que par une personne. Ne pas l'utiliser pour quoi que ce soit d'autre.



MODÈLES DE SIÈGE SPORT

Avec sa pique et sa rondelle en plus, le modèle Sport peut être utilisé sur un sol meuble en enlevant tous les embouts en caoutchouc. Replacer tous les embouts en caoutchouc pour une utilisation sur un sol dur.



MODÈLES
DISPONIBLES

Armature en
aluminium
poli et toile
colorée

Ou
armature
peinte

"Deluxe"
assortie à
la couleur
de la toile –

COULEURS
DISPONIBLES

Noir, vert ou
bordeaux

