

Quattro

SORTIMENTET

Från vandringspinne till en vilostol på ett ögonblick!

Tack för att du väljer en Linden Quattro-stol. Vi önskar dig många år av nöjd användning. Läs alla instruktioner för din fullständiga säkerhet:

- Quattro 32 – Gånghöjd: 815 mm
Sithöjd: 480 mm
- Quattro 34 – Gånghöjd: 865 mm
Sithöjd: 525 mm
- Quattro 37 – Gånghöjd: 940 mm
Sithöjd: 590 mm
- Maximal användarvikt: 125 kg.

Din Quattro-stol är komplett med fyra gummidoppskor och har utformats för att användas på jämna ytor som inte är hala.

OBS! Kontrollera regelbundet att samtliga gummidoppskor är i gott skick. Använd ALDRIG en stol om en doppsko saknas för din säkerhets skull.

1. För att använda en stol: Öppna helt och säkerställ att alla benen är i kontakt med marken.
2. Sätt dig ned långsamt. För maximal stabilitet är det viktigt att du har benen framför dig, och båda fötterna fast på marken när du sitter ned.
3. Quattro-stolen är endast avsedd för användning för en person. Använd den inte för något annat.



SPORTMODELLER

Sportmodellen med en ytterligare fästpunkt och fotplatta kan användas på ett mjukt underlag genom att ta bort alla gummidoppskor. Sätt tillbaka alla gummidoppskor för användning på ett hårt underlag.



TILLGÄNGLIGA
MODELLER

Polerad
aluminiumra
m och färgad
kanvas

eller

"Deluxe"-
målad ram för
att matcha
stolfärg

Tillgängliga
färger:

Svart eller grön