

# Supaseat

SORTIMENT

## Fra spadserestok til siddestok på bare et øjeblik!

Tak fordi du valgte en Linden Supaseat. Vi ønsker dig glæde med den i mange år frem i tiden. For sikker brug bedes du læse alle instruktionerne:

- Supaseat – Observer, Explorer, Foldaway og Gripseat

Gåhøjde: 850 mm til 1030 mm

Sædehøjde: 650 mm til 830 mm


- Maksimal brugervægt: 125 kg.

Din Supaseat er udviklet til brug af kun én person.

Bør ikke anvendes til andre formål.

**FORSIGTIG:** Siddestokken med en enkelt stang er udviklet til brugere, som kan balancere sikkert på sædet og skabe en stabil trefod med deres vægt fordelt imellem sæde og fødder. Hvis du har et handicap eller en lidelse, som påvirker din balanceevne bedes du altid opsøge din læge forud for brug.

1. Højden kan justeres ved at trykke på de to springknapper og foden trækkes ud i den ønskede længde. Forsikr dig om at begge knapper er låste i et sæt huller før brug.
2. Når du sidder på sædet: Placer sædet bag dig med basen i en afstand på omkring 45cm. Læn sædet hen i mod dig selv og sæt dig langsomt med en afstand på omkring 45cm imellem fødderne.

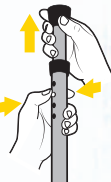

### FOLDAWAY (illustreret nedenfor)

Fjern først spidsen og pladefoden fra tasken.

Fjern så sædet med dupsko mens du sørger for at holde fast på både sæde og stænger. Stængerne løsnes så de falder sammen.



### GRIPSEAT

Gripseat med magnetiske ender er ideelt til opsamling af brugte patronhylstre.

TILGÆNGELIG  
E MODELLER  
**Observer**  
(gummi dupsko)  
**Explorer**  
(spids og plade kun til brug i blødt underlag)  
**Foldaway**  
(gummi dubsko samt spids og plade)  
**Gripseat**  
(spids og plade kun til brug i blødt underlag, magnetisk spids)

TILGÆNGELIG  
E FARVER:  
Sort eller Grøn