

Supaseat

GAMME SUPASEAT

Passez d'une canne de marche à un siège en un instant!

Nous vous remercions d'avoir choisi la canne-siège Linden Supaseat. Nous vous souhaitons de nombreuses années d'utilisation heureuse. Pour votre sécurité, veuillez lire les instructions suivantes :

- Supaseat – Observer, Explorer, Foldaway en Gripseat

Hauteur de marche de : 850 mm à 1030 mm


Hauteur d'assise de : 650 mm à 830 mm

- Poids maximum supporté : 125 kg

Votre Supaseat est conçue pour n'être utilisée que par une personne. Ne pas l'utiliser pour quoi que ce soit d'autre.

AVERTISSEMENT : le tube unique des cannes-sièges est adapté aux personnes capables de s'équilibrer sans risque sur le siège et de former un trépied stable en partageant leur poids équitablement entre le siège et les pieds. Si vous avez un handicap ou une maladie qui peut affecter votre équilibre, demandez toujours conseil à votre médecin avant utilisation.

1. La hauteur est réglable en appuyant sur les deux boutons à ressort et en faisant coulisser le pied à la longueur souhaitée. Assurez-vous de bien remettre les deux boutons dans leurs encoches avant utilisation.

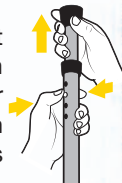

2. S'asseoir sur le siège : Placez le siège derrière vous en mettant la base à environ 45 cm. Penchez le siège vers vous et asseyez-vous doucement avec vos pieds à 45 cm d'écart.



FOLDAWAY (photos ci-dessous)

Tout d'abord, enlevez les deux pieds du sac.

Puis enlevez le siège, en vous assurant de tenir à la fois le siège et les tubes. Retirez doucement les tubes pour qu'ils puissent s'empiler.



GRIPSEAT

Avec son extrémité magnétique, la Gripseat est idéale pour ramasser les cartouches de fusil usagées.

MODÈLES
DISPONIBLES

Observer
(embout en
caoutchouc)

Explorer
(pique et rondelle
pour les sols
meubles seulement)

Foldaway
(embout en
caoutchouc, et pique
et rondelle)

Gripseat
(pique et rondelle
pour les sols meubles,
extrémité magnétique)

COULEURS
DISPONIBLES

Noir, Marron
ou Vert