

Supaseat

SITZSTOCK-PRODUKTPALETTE

Im Handumdrehen vom Spazierstock zum erholsamen Sitzstock!

Vielen Dank dafür, dass Sie einen neuen Linden Supaseat- Sitz gewählt haben und wir wünschen Ihnen einen hilfreichen Begleiter für viele Jahre. Zu Ihrer Sicherheit lesen Sie bitte alle Anweisungen:

- **Supaseat – Observer, Explorer, Foldaway & Gripseat**

Gehhöhe: 850 mm bis 1030 mm

Sitzhöhe: 650 mm bis 830 mm

- **Max. Benutzergewicht: 125 kg**


Der Supaseat- Stock ist für den Gebrauch als Sitz für eine Person bestimmt. Benutzen Sie ihn nicht für andere Zwecke.

ACHTUNG: Einrohr-Sitzstöcke sind nur für Personen geeignet, die auf dem Sitz sicher die Balance halten können. Sie sollten in der Lage sein, mit den Füßen und der Sitzfläche durch die gleichmäßige Verteilung Ihres Gewichtes ein Dreieck bilden zu können. Falls Sie eine Behinderung oder eine Einschränkung haben, die Ihre Balance beeinflusst, sollten Sie vor der Benutzung ärztlichen Rat einholen.

1. Die Höhe wird verstellt, indem Sie beide Federknöpfe eindrücken und das Innenrohr auf die gewünschte Länge einstellen. Stellen Sie sicher, dass beide Federknöpfe wieder in das gewünschte Lochpaar springen, bevor Sie den Sitz benutzen.



2. Sitz einnehmen: Platzieren Sie den Sitzstock ca. 45 cm hinter sich. Lehnen Sie den Sitz nach vorne und setzen Sie sich langsam hin, die Füße ca. 45 cm auseinander.

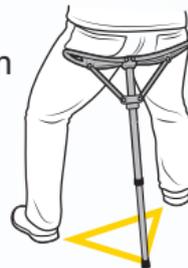

FOLDAWAY (siehe Abbildung unten) Zuerst entnehmen Sie bitte den Fuß mit der Spitze/Scheibe der Tasche. Danach entnehmen Sie den Sitz mit dem Gummifuß und achten dabei auch darauf, die Stangen festzuhalten. Verbinden die Stangen so, dass sie ineinander passen.



GRIPSEAT

Der Gripseat mit magnetischem Ende ist ideal geeignet für das Einsammeln leerer Schrotpatronen-Hülsen.

**VERFÜGBARE
MODELLE:**

Observer
(mit Gummifuß)

Explorer
(mit Spitze und
Scheibe nur
für weichen
Untergrund)

Foldaway
(mit Gummifuß und
Spitze/Scheibe)

Gripseat
(nur mit Spitze
und Scheibe für
weichen Untergrund,
mit Magnetende)

**VERFÜGBARE
FARBEN:**

Schwarz, Braun
oder Grün

