

Im Handumdrehen vom Spazierstock zum erholsamen Sitzstock!

Vielen Dank dafür, dass Sie einen neuen Linden Trio- Sitz gewählt haben und wir wünschen Ihnen einen hilfreichen Begleiter für viele Jahre. Zu Ihrer Sicherheit lesen Sie bitte alle Anweisungen:

- Trio Popular – Gehhöhe: 845 mm
Sitzhöhe: 455 mm
- Trio Maxi – Gehhöhe: 870 mm
Sitzhöhe: 575 mm
- Max. Benutzergewicht: 125 kg

Ihr Trio- Sitz ist komplett mit drei Gummifüßen ausgestattet und wurde vorzugsweise für den Einsatz auf ebenen, nicht rutschigen Oberflächen entwickelt.

ACHTUNG: Überprüfen Sie regelmäßig, ob, die Gummifüße in gutem Zustand sind. Benutzen Sie den Sitz niemals, wenn ein Gummifuß fehlt.

1. Benutzung als Sitz: Öffnen Sie ihn vollständig. Stellen Sie sicher, dass alle drei Füße Kontakt mit dem Untergrund haben.
2. Setzen Sie sich langsam hin. Während des Sitzens sollte der Handgriff immer hinter Ihnen sein und beide Füße sollten festen Bodenkontakt haben. (Siehe Abbildung)
3. Der Trio- Sitz ist für den Gebrauch als Sitz für eine Person bestimmt. Benutzen Sie ihn nicht für andere Zwecke.



SPORT- MODELLE

Die Sport - Modelle mit zusätzlicher Spitze und Scheibe können auf weichem Untergrund benutzt werden, indem man alle Gummifüße entfernt. Für Benutzung auf hartem Untergrund setzen Sie die Gummifüße wieder auf.



VERFÜGBARE
MODELLE:

Polierter
Aluminium-
Rahmen

oder

Deluxe:
Farbiger
Rahmen
passend zur
Sitzfläche –

VERFÜGBARE
FARBEN:

Schwarz,
Braun oder
Grün