

Fra spadserestok til siddestok på bare et øjeblik!

Tak fordi du valgte en Linden Trio stol. Vi ønsker dig glæde med den i mange år frem i tiden. For sikker brug bedes du læse alle instruktionerne:

- Trio Popular – Gåhøjde: 845 mm
Sædehøjde: 455 mm
- Trio Maxi – Gåhøjde: 870 mm
Sædehøjde: 575 mm
- Maksimal brugervægt: 125 kg.

Din Trio stol er udstyret med tre gummi dupsko og er blevet designet til brug på jævne og ikke glatte overflader.

HUSK: Jævnligt at tjekke at alle gummi dupsko er i god stand. For din egen sikkerheds skyld bør du **ALDRIG** bruge stolen uden dupsko.

1. Til brug som stol: Den åbnes helt og du tjekker at alle fødder er kontakt med jorden.
2. Sæt dig langsomt på sædet. Når du sidder skal håndtaget altid være bag dig og begge fødder skal være placeret på jorden. (se billede).
3. Din Trio stol er udviklet til brug af kun én person. Bør ikke anvendes til andre formål.



SPORT STOLE MODELLER

Sport stole modellerne med ekstra spidser og pladefødder kan anvendes på blødt underlag ved at fjerne alle gummi dupsko. Fjern alle dupsko når stolen bruges på hårdt underlag.



TILGÆNGELIGE
MODELLER

Poleret
aluminiums
ramme

eller

"Deluxe" malet
ramme som
matcher
sædefarven –

TILGÆNGELIGE
FARVER:

Sort, brun
eller grøn