

# Trio

-ISTUINMALLIT

## Kävelykepeistä kätevästi istuimeksi hetkessä!

Kiitos, että valitsit Linden Trio -istuimen. Toivotamme monia tyytyväisiä käyttövuosia. Turvallisuuden varmistamiseksi lue kaikki ohjeet:

- Trio Popular – Kävelykepin korkeus: 845 mm  
Istuimen korkeus: 455 mm
- Trio Maxi – Kävelykepin korkeus: 870 mm  
Istuimen korkeus: 575 mm
- Käyttäjän enimmäispaino: 125 kg.

Trio-istuimessa on kolme kumijalkaa, ja se on suunniteltu käytettäväksi tasaisilla, pitävillä pinnoilla.

**HUOMIO:** Tarkista säännöllisesti, että kaikki kumijalat ovat hyvässä kunnossa. Turvallisuussyistä ÄLÄ käytä istuinta, jos jokin jaloista puuttuu.

1. Käyttö istuimena: Avaa täysin ja varmista, että kaikki jalat koskettavat maata.
2. Istu alas hitaasti. Istu aina niin, että kahva on takanasi ja molemmat jalkasi tukevasti maassa (Katso kuvaa.)
3. Trio-istuin on tarkoitettu vain yhden henkilön istuimeksi. Älä käytä sitä mihinkään muuhun.



## SPORT-ISTUINMALLIT

Sport-istuinmalleja, joissa on lisänä kärki ja levy -jalat, voidaan käyttää pehmeällä maalla irrottamalla kaikki kumijalat. Laita kumijalat takaisin kovalla pinnalla käytettäessä.



SAATAVILLA  
OLEVAT MALLIT

Kiillotettu  
alumiinirunko

tai

Deluxe, jossa  
istuimen  
väriseksi  
maalattu  
runko –

SAATAVILLA  
OLEVA VÄRIT:

Musta, ruskea  
tai vihreä