

Fra gåstav til behagelig sete på et blunk!

Takk for at du valgte et Linden Trio-sete. Vi ønsker deg mange år med hyggelig bruk. For din sikkerhet ber vi deg vennligst å lese alle instruksjonene:

- Trio Popular – Gåhøyde: 845 mm
Sitt høyde: 455 mm
- Trio Maxi – Gåhøyde: 870 mm
Sitt høyde: 575 mm
- Maks brukervekt: 125 kg.

Trio-setet ditt har tre endehylser i gummi, og er designet for bruk på en flat overflate som ikke sklir.

NB: Sjekk jevnlig at alle gummihylsene er i god stand. For din sikkerhet må du ALDRI bruke setet dersom en av hylsene mangler.

1. Bruke som sete: Åpne fullstendig, og pass på at alle føttene er i kontakt med bakken.
2. Sett deg forsiktig ned. Når du sitter må du alltid ha håndtaket bak deg og begge føttene på bakken. (se bilde).
3. Trio-setet er ment for bruk av kun én person.
Ikke bruk setet til andre formål.



SPORTSSETEMODELLER

Sportssetemodellene har i tillegg føtter med en spiss og en plate som kan brukes på mykt underlag ved å fjerne gummihylsene. Sett tilbake alle hylsene for bruk på en hard overflate.



TILGJENGELIGE
MODELLER

Polert
aluminiumsramme

eller

"Deluxe" malt
ramme for å
matche fargen
på setet –

TILGJENGELIGE
FARGER:

Sort, brun
eller grønn