

Passez d'une canne de marche à un siège en un instant!

Nous vous remercions d'avoir choisi la canne- siège Linden Trio. Nous vous souhaitons de nombreuses années d'utilisation heureuse. Pour votre sécurité, veuillez lire les instructions suivantes :

- Trio Popular – Hauteur de marche : 845 mm
Hauteur d'assise : 455 mm
- Trio Maxi – Hauteur de marche : 870 mm
Hauteur d'assise : 575 mm
- Poids maximum supporté : 125 kg

Votre canne- siège Trio est livrée avec trois embouts en caoutchouc et elle a été conçue pour être utilisée sur des surfaces planes et non-glissantes.

NB: vérifiez régulièrement que tous les embouts en caoutchouc soient en bon état. Pour votre sécurité, n'utilisez JAMAIS la canne siège s'il manque un embout.



1. Pour l'utiliser comme un siège: ouvrez-le complètement et assurez-vous que tous les pieds soient en contact avec le sol.
2. Asseyez-vous doucement. Lorsque vous, vous asseyez, ayez toujours la poignée derrière vous et vos deux pieds au sol. (voir image).
3. La canne -siège Trio est conçue pour n'être utilisée que par une personne. Ne pas l'utiliser pour quoi que ce soit d'autre.



MODÈLES DE SIÈGE SPORT

Avec sa pique et sa rondelle en plus, le modèle Sport peut être utilisé sur un sol meuble en enlevant tous les embouts en caoutchouc. Replacer tous les embouts en caoutchouc pour une utilisation sur un sol dur.



MODÈLES
DISPONIBLES

Armature en
aluminium
poli

Ou

armature
"Deluxe"
peinte de
couleur
assortie au
siège –

COULEURS
DISPONIBLES

Noir, Brun
ou Vert